

# Instruções de uso do carro para cadeirante

1 - Posicione-se na frente do carrinho.



2 - Encaixe o carrinho na cadeira de rodas.



3 - Localize os velcros nas laterais do carrinho.



4 - Encontre o melhor ponto em sua cadeira onde possa prender o velcro, amarrando o carrinho na cadeira.



5 - Mova-se com a cadeira e certifique-se que o carrinho está bem amarrado a cadeira.



5 - Pronto para ir às compras.



Atenção: Este carrinho foi desenvolvido para atender aos modelos de cadeiras de rodas simples, que tenha apoio para os braços do cadeirante.